

CLOSED**FR**

UNDERLAY TT

GUIDE DES TAILLES

Guide de taille intelligent


[Cliquer ici](#)

Conçu pour tous les systèmes de suspension :
- Verrouillage distal (pin ou Lanières)
- Systèmes de vide actifs ou passifs
- Manchon de suspension

Pour déterminer la taille appropriée, mesurer la circonférence du membre résiduel à 10 cm de l'extrémité distale, puis mesurer la longueur du liner découpé.


ÉTAPE 1

Quelle taille ?

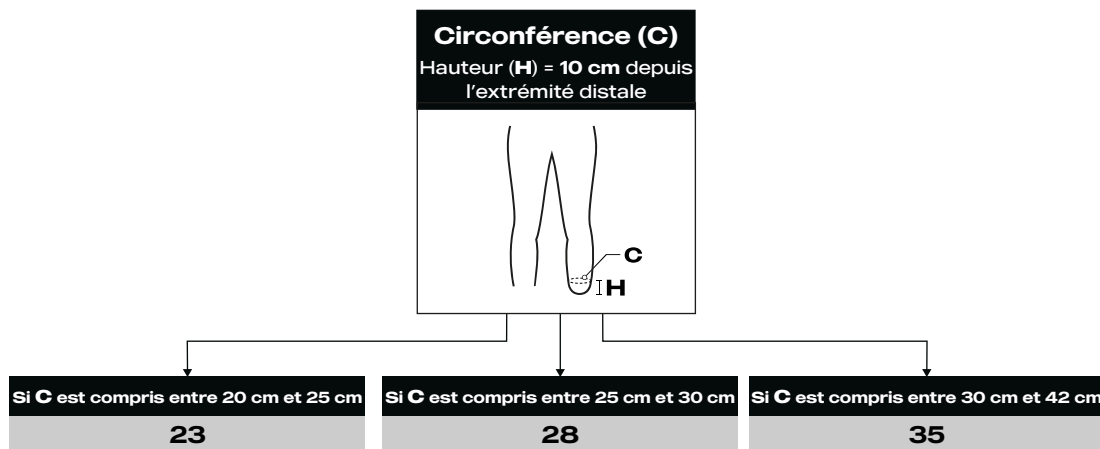

ÉTAPE 2



Quelle longueur ?

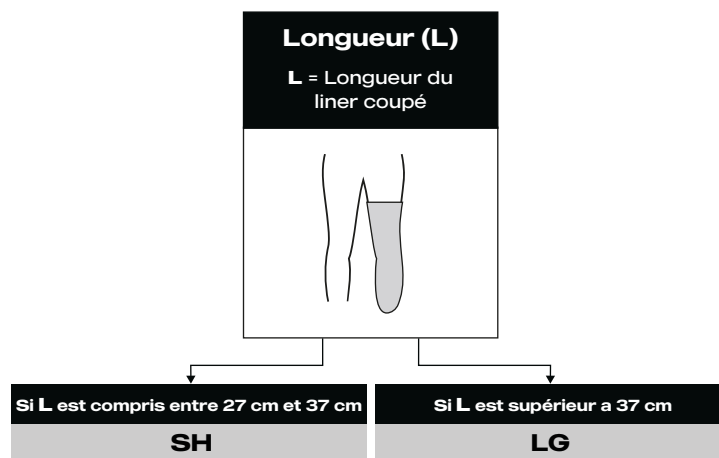

Circonférence (C)	Longueur (L)	Code
20-25 cm	27-37 cm	UDTT-23-SH-C
	37+ cm	UDTT-23-LG-C
25-30 cm	27-37 cm	UDTT-28-SH-C
	37+ cm	UDTT-28-LG-C
30-42 cm	27-37 cm	UDTT-35-SH-C
	37+ cm	UDTT-35-LG-C

Important:


S'assurer que le Underlay Closed est positionné à **2 in/5 cm** sous le bord supérieur du liner.

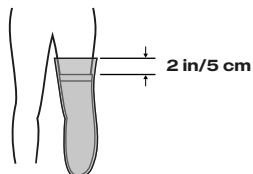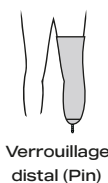**Conçu pour:**


Verrouillage distal (Pin)




Lanières

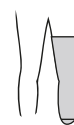

Liner sans verouillage

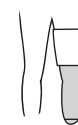

Manchon de suspension

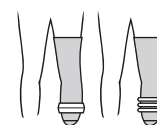

Joint distal

Consulter la page suivante pour

Underlay TT Open →**ETHNOCARE™**


[Cliquer ici](#)

Conçu pour les systèmes de verrouillage distal :

- Pin
- Système à lanières
- Joint distal


Pour déterminer la taille appropriée, mesurer deux circonférences directement sur la peau : à 10 cm de l'extrémité distale et juste au-dessus du liner découpé. Puis mesurer la longueur du liner découpé.

ÉTAPE 1

Quelle taille ?

Circonférence (C₁)

Hauteur (H) = 10 cm depuis l'extrémité distale

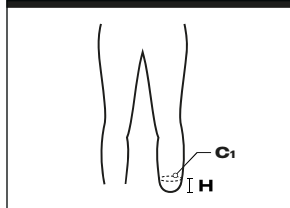

Si C₁ est compris entre 20 cm et 25 cm

23

Si C₁ est compris entre 25 cm et 30 cm

28

Si C₁ est compris entre 30 cm et 42 cm


35

ÉTAPE 2

Quelle version ?

Circonférence (C₂)

C₂ = Circonférence en haut du liner (mesuré sur la peau)

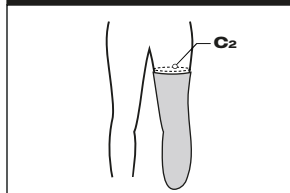

C₂ plus petit que 35 cm

Taille 23

C₂ plus grand que 35 cm

UNDERLAY CLOSED*

C₂ plus petit que 45 cm

Taille 28

C₂ plus grand que 45 cm

UNDERLAY CLOSED*

C₂ plus petit que 55 cm

Taille 35

C₂ plus grand que 55 cm


UNDERLAY CLOSED*

ÉTAPE 3

Quelle longueur ?

Longueur (L)

L = Longueur du liner coupé

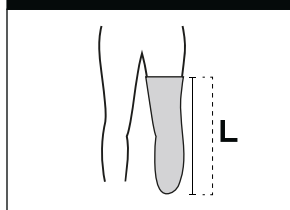

Si L est compris entre 23 cm et 28 cm

SH

Si L est compris entre 28 cm et 33 cm

MD

Si L est compris entre 33 cm et 38 cm


LG

Si L est supérieur à 38 cm

XL

Circonférence (C ₁)	Longueur (L)	Code
20-25 cm	23-28 cm	UDTT-23-SH
	28-33 cm	UDTT-23-MD
	33-38 cm	UDTT-23-LG
	38+ cm	UDTT-23-XL
25-30 cm	23-28 cm	UDTT-28-SH
	28-33 cm	UDTT-28-MD
	33-38 cm	UDTT-28-LG
	38+ cm	UDTT-28-XL
30-42 cm	23-28 cm	UDTT-35-SH
	28-33 cm	UDTT-35-MD
	33-38 cm	UDTT-35-LG
	38+ cm	UDTT-35-XL

Conçu pour:

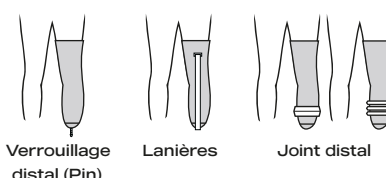

Verrouillage distal (Pin)


Lanières

Joint distal

*Si la mesure dépasse la valeur C₂ indiquée, le membre résiduel est trop conique pour les tailles disponibles. Sélectionner un Underlay Closed pour un ajustement optimal.

Important:

S'assurer que le Underlay Open est positionné à **4 in/10 cm** de l'extrémité distale.

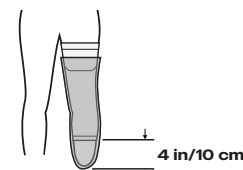

Consulter la page suivante pour

Underlay TT Closed →

ETHNOCARE™