

# Conçue pour faciliter chaque pas : la gamme Pace

Une gamme perfectionnée d'orthèses  
tibio-pédieuses en fibres de carbone



**Pace**  
Orthèses tibio-pédieuses  
en fibres de carbone



# A-Pace

## Orthèse tibio-pédieuse à montant antérolatéral

### Fermetures magnétiques

Pose facile d'une seule main



### Confort

Coussinage doux, respirant et élégant



### Réglable

Protège-tibia antérieur réglable en hauteur

### Résistante et légère



Fibres de carbone Formule 1 et de qualité aérospatiale



### Caractéristiques :

**Orthèse tibio-pédieuse à montant antérolatéral** de rigidité intermédiaire offrant une combinaison optimale en matière de soutien, de flexibilité et de restitution d'énergie, parfaite pour un mode de vie actif.

**Fabriquée à partir de couches de fibres de carbone Formule 1 et de qualité aérospatiale**, avec moins de points de raccords pour une résistance et une fiabilité améliorées. (20 % plus légère que Matrix Max et 25 % plus légère que Max 2.)

**Fermetures magnétiques** permettant une pose facile d'une seule main, idéales pour les utilisateurs ayant une dextérité manuelle réduite.

**Assise podale de conception ergonomique** avec talon incurvé pour un ajustement adapté à l'anatomie.

**Assise podale plus étroite s'adaptant à une plus grande variété de chaussures.**

**Choix de deux grandeurs**, avec assise podale taillable adaptée aux pointures américaines, permettant de réduire le nombre de numéros d'article.

Protège-tibia souple et résistant à **hauteur réglable**, qui épouse confortablement l'anatomie du mollet.

**Coussinage élégant, respirant et souple pour un confort durant toute la journée.**

### Indications:

- Pour patients à niveau d'activité faible à élevé
- Cas de pied tombant léger à modéré
- Avec spasticité légère à modérée du pied ou sans spasticité
- Avec faiblesse musculaire ou atrophie des muscles du mollet
- Applications unilatérales et bilatérales

### Compatibilité avec les chaussures

Assise podale ergonomique et mince conçue pour s'adapter à une plus grande variété de chaussures.

### Gamme de tailles simplifiée

Deux grandeurs avec ajustement personnalisé/taillable pour réduire le nombre de numéros d'article

# U-Pace

## Orthèses tibio-pédieuses universelles à montant postéro-médiale ou postéro-latérale



### Fermetures magnétiques

Pose facile d'une seule main



### Confort

Coussinage doux, respirant et élégant



### Réglable

Molletière antérieure réglable en hauteur

### Résistante et légère

Fibres de carbone Formule 1 et de qualité aérospatiale



### Gamme de tailles simplifiée

Taille unique avec assise podale taillable pour un ajustement personnalisé réduisant le nombre de numéros d'article



### Caractéristiques :

**Orthèse tibio-pédieuse à montant postérieur de taille unique** et de rigidité intermédiaire qui offre une combinaison optimale en matière de soutien, de flexibilité et de restitution d'énergie.

**Disponible en configurations postéro-médiale et postéro-latérale** pour répondre aux différents besoins des patients.

**Taille universelle. Quatre numéros d'article.** Permet de maintenir un inventaire minimal.

Fabriquée à partir de couches de **fibres de carbone** Formule 1 et de qualité aérospatiale.

**Construite sans articulation pour une résistance et fiabilité accrues.**

**Fermetures magnétiques** permettant une pose facile d'une seule main. Idéale pour les utilisateurs ayant une dextérité manuelle réduite.

**Assise podale plus étroite** s'adaptant à une plus grande variété de chaussures.

**Réglable en hauteur et assise podale taillable.**

**Coussinage doux et souple**, à la fois élégant et respirant. Pour un confort tout au long de la journée.

### Indications:

- Pour patients à niveau d'activité faible à élevé
- Cas de pied tombant léger à modéré
- Avec spasticité légère à modérée du pied ou sans spasticité
- Avec faiblesse musculaire ou atrophie des muscles du mollet
- Applications unilatérales et bilatérales

# L-Pace & M-Pace

## Orthèses tibio-pédieuses postéro-latérale et postéro-médiale

### Caractéristiques :

**Montant postéro-latéral (L-Pace) ou postéro-médial (M-Pace)** de rigidité intermédiaire, offrant une combinaison optimale en matière de soutien, de flexibilité et de restitution d'énergie.

**Fabriquée à partir de matériaux en fibre de carbone de qualité aérospatiale**, alliant légèreté, résistance et durabilité.

**Assise podale ergonomique avec talon incurvé** pour un ajustement et un confort améliorés.

Assise podale plus étroite **s'adaptant à une plus grande variété de chaussures.**

Molletière coussinée et respirante, équipée d'une **sangle autoagrippante à traction inversée** pour un maintien sûr et confortable.

**Bande postérieure souple et hautement résistante** qui se conforme et épouse les contours du mollet.

### Indications:

- Pour patients à niveau d'activité faible à élevé
- Cas de pied tombant léger à modéré
- Avec spasticité légère à modérée du pied ou sans spasticité
- Avec faiblesse musculaire ou atrophie des muscles du mollet
- Applications unilatérales et bilatérales



### Compatibilité avec les chaussures

Assise podale ergonomique et mince conçue pour s'adapter à une plus grande variété de chaussures.



### Confort durable et élégant

Molletière coussinée et respirante avec sangle à traction inversée.



### Résistante et légère

Matériaux en fibres de carbone de qualité aérospatiale, conception robuste et profilée.

## L-Pace

## M-Pace





# Spécifications



## Sélection A-Pace

| N° d'article Droit | N° d'article Gauche | Grandeur      | Hauteur                      | Longueur du pied         | Pointure Améric. | Pointure Europ. | Pointure Roy.-Uni |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| FH50OR01           | FH50OL01            | Petit/Moyen   | 36.3-39.7 cm / 14.3-15.6 po. | 23-27 cm / 9.1-10.6 po.  | 6/12             | 37/43           | 4/9               |
| FH50OR02           | FH50OL02            | Grand/T.Grand | 37.3-40.7 cm / 14.7-16 po.   | 26-30 cm / 10.2-11.8 po. | 9.5/15           | 41.5/47         | 7.5/12            |

## Sélection U-Pace

| N° d'article | Description                                 | Grandeur           | Hauteur                  | Longueur du pied            |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| FH46OR01     | U-Pace, OTP Univ. Postéro-Médiale - Droite  | Taille universelle | 34-39 cm / 13.4-15.4 po. | 22.5-30 cm / 8.9 - 11.8 po. |
| FH46OR02     | U-Pace, OTP Univ. Postéro-Latérale - Droite |                    |                          |                             |
| FH46OL01     | U-Pace, OTP Univ. Postéro-Médiale - Gauche  |                    |                          |                             |
| FH46OL02     | U-Pace, OTP Univ. Postéro-Latérale - Gauche |                    |                          |                             |



## Sélection L-Pace

| N° d'article Droit | N° d'article Gauche | Grandeur | Hauteur            | Longueur du pied    | Pointure Améric. | Pointure Europ. | Pointure Roy.-Uni |
|--------------------|---------------------|----------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| FH45OR02           | FH45OL02            | Petit    | 36.5 cm / 14.4 po. | <23.6 cm / <9.3 po. | 5/6              | 36/38           | 4/5.5             |
| FH45OR03           | FH45OL03            | Moyen    | 36.5 cm / 14.4 po. | 25 cm / 9.8 po.     | 7/8              | 39/40           | 6/7               |
| FH45OR04           | FH45OL04            | Grand    | 38.5 cm / 15.2 po. | 26.4 cm / 10.4 po.  | 9/10             | 41/43           | 7.5/9.5           |
| FH45OR05           | FH45OL05            | T.Grand  | 38.5 cm / 15.2 po. | 27.4 cm / 10.8 po.  | 10>              | 43>             | 9.5>              |



## Sélection M-Pace

| N° d'article Droit | N° d'article Gauche | Grandeur | Hauteur            | Longueur du pied    | Pointure Améric. | Pointure Europ. | Pointure Roy.-Uni |
|--------------------|---------------------|----------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| FH40OR02           | FH40OL02            | Petit    | 36.5 cm / 14.4 po. | <23.6 cm / <9.3 po. | 5/6              | 36/38           | 4/5.5             |
| FH40OR03           | FH40OL03            | Moyen    | 36.5 cm / 14.4 po. | 25 cm / 9.8 po.     | 7/8              | 39/40           | 6/7               |
| FH40OR04           | FH40OL04            | Grand    | 38.5 cm / 15.2 po. | 26.4 cm / 10.4 po.  | 9/10             | 41/43           | 7.5/9.5           |
| FH40OR05           | FH40OL05            | T. Grand | 38.5 cm / 15.2 po. | 27.4 cm / 10.8 po.  | 10>              | 43>             | 9.5>              |





### **Trulife Jackson**

2010 East High Street  
Jackson, MI 49203, USA



+1 800 492 1088



[info-usa@trulife.com](mailto:info-usa@trulife.com)

### **Trulife Bellingham**

3225 Woburn Street, Suite 160  
Bellingham, WA 98226, USA



+1 866 477 6262



[info-usa@trulife.com](mailto:info-usa@trulife.com)